

		Utskickat	2020-09-29
		Sista analysdag	2020-10-05
		Sista svarsdag	2020-10-06
Programkoordinator	Ingegerd Samuelsson		
Telefon, vxl	018-490 31 00		
E-post	ingegerd.samuelsson@equalis.se		

## Provmaterial

Benämning Equalis | Art. Nr: 13 | 2020:08/Hb:Glukos och 2020:08/CRP

Märkning på rör



Art. Nr: 13  
2020:08/Hb:Glukos



Art. Nr: 13  
2020:08/CRP

Beskrivning **Equalis | Art. Nr: 13 | 2020:08/Hb:Glukos:** Helblod med tillsats av EDTA och stabiliserande substans för analys av **B—Hemoglobin och P—Glukos**  
**Equalis | Art. Nr: 13 | 2020:08/ CRP:** Helblod med tillsats av EDTA och CRP för analys av **P—CRP.**

Förvaring Förvaras i kylskåp (+2 till +8 °C) efter ankomst.

Smittrisk HIV-antikroppar: Negativ  
HIV-antigen: Negativ  
HBs-antigen: Negativ  
HCV-antikroppar: Negativ  
Smittestningen är utförd på poolat patientprov. Materialet bör av säkerhetsskäl alltid behandlas som ett okänt patientprov

Hållbarhet Analysen kan utföras trots förvaring i rumstemperatur vid sen ankomst av posten fram till sista analysdag. Om er metod är känslig för hemolys bör analysen dock utföras senast på onsdagen.

## Utförande av undersökning

Materialen ska ha rumstemperatur före analys.  
Blanda proverna noga minst 20 gånger manuellt eller 5 minuter på vaggå före analys. Utför analyserna som enkelprov enligt era normala rutiner både när det gäller spädning och analys.

## Registrering av resultat

Resultaten registreras via Equalis Online med tre värdesiffror, om så är möjligt.  
Registrerade resultat kan vid behov ändras till och med sista svarsdag.  
Lotnummer. Vi ber er registrera lotnumret för ert reagens/testkit i avsett fält på Equalis Online.

## Metoduppgifter

Kontrollera att informationen om er instrumentmodell är korrekt, om inte ändra dem på Equalis Online eller meddela Equalis på annat sätt.

## Återrapportering

Rapport med resultatsammanställning beräknas vara deltagarna tillhanda inom en månad från sista svarsdag.